

DESIFOR-forte AF neu

Désinfection de surfaces • Effet virucide limité PLUS
• Produit médical



Domaine d'application

Pour la désinfection de toutes les surfaces et les sols imperméables dans le domaine de la médecine humaine, le secteur alimentaire, l'industrie et les établissements publics. Comme produit biocide : désinfection et nettoyage des équipements médicaux ainsi que des surfaces de toute nature. Comme produit médical : désinfection et nettoyage d'équipements médicaux non invasifs. Pour le secteur professionnel.

Mode d'emploi

Essuyer la surface avec la solution DESIFOR-forte AF nouveau – ou appliquer sur toute la surface. Après le temps d'action, rincer soigneusement à l'eau claire (eau potable) la surface et les équipements de travail en contact avec les aliments. Exemple d'application pour 1 litre d'une solution 1 % : préparer 990 ml d'eau et ajouter 10 ml du produit

Informations techniques

Carton de 9 flacons doseurs de 1 l Réf. 20491
Bidon de 5 l (Modèle « KH », haut) Réf. 20492
Bidon de 10 l Réf. 20493

Substances actives

10,8g chlorure de didécyl-diméthyl-ammonium
6,0g N-(3-Aminopropyl)-N-dodécyl-propane-1,3-diamine

Identification selon le règlement CE 1272/2008 (CLP) :
Danger ; GHS05, GHS07, GHS09

N° d'immatriculation de l'office fédéral de la
sécurité et de la santé au travail N-84407

CHZN5718



Utiliser avec précaution les produits biocides.
Toujours lire les étiquettes et les informations-produits
avant usage.

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à
notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un
quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez
consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de
sécurité. (F) 0324

Domaine d'utilisation/ Efficacité	Concentration/ Temps de pose	Remarque
Bactéricide, levurocide (Domaine de la médecine humaine)	0,5 % 15 Min.	EN 13727, EN 13697, EN 13624, VAH, EN 16615, charge élevée
Bactéricide, levurocide (alimentaire, industrie, ménages et établissements publics)	0,5 % 15 min.	EN 13697, charge élevée
Tuberculocide (M. terrae)	2,0 % 15 min. 0,5 % 60 min. 1,0 % 60 min.	EN 14348, charge faible EN 14348, faible charge EN 14348, charge élevée
Effet virucide limité (y compris VIH, VHB, VHC)	0,5 % 15 min.	Directive de la DW/du RDKI
Effet virucide limité PLUS)	2,0 % 30 min.	EN 14476, charge faible
Adénovirus)	2,0 % 30 min.	EN 14476, charge faible
Norovirus	1,0 % 60 min. 1,5 % 15 min	EN 14476, charge élevée EN 14476, charge élevée
Rotavirus	0,5 % 15 min.	EN 14476, charge faible
Polyomavirus (Papovavirus SV 40)	1,0 % 15 min.	EN 14476, charge élevée

Caractéristiques

- Bactéricide (y compris MRSA) et levurocide
- Effet virucide limité (y compris VIH, VHB, VHC, coronavirus)
- Effet virucide limité PLUS (y compris les rotavirus, norovirus, adénovirus)
- Sans aldéhydes
- Excellentes propriétés de nettoyage
- Application avec lingette prête à l'emploi : LINGETTES DESIFOR-ONE (EN 16615, test 4 domaines)
- Répertoire OHI
- Listé par la VAH
- Conformité HACCP

Conseils d'utilisation

Date de péremption : 3,5 ans à compter de la date de production. Conservation après
ouverture : 3,5 ans.
Respecter la fiche des données de sécurité.

pH conc **0 2 4 6 8 12 14**