



Milibac N

Désinfection de surfaces • Détartrant

Domaine d'application

Pour la désinfection des surfaces résistantes aux acides dans le domaine de la médecine humaine, dans l'industrie et les établissements publics (espaces sanitaires, piscine, centre de bien-être). MILIBAC N élimine toutes les impuretés minérales et organiques.

Mode d'emploi

Essuyer la surface avec la solution d'application MILIBAC N ou l'appliquer sur toute la surface. Exemple d'application pour 1 litre d'une solution 2 % : préparer 980 ml d'eau et ajouter 20 ml du produit.

Domaine d'utilisation/Efficacité	Concentration/Temps de pause	Remarque
Bactéricide, levurocide (alimentaire, industrie, ménages et établissements publics)	2,0 % 15 min.	EN 1276, charge faible ; EN 1650, charge faible ; EN 13697, charge faible
Effet virucide limité (y compris HIV, HBV, HCV)	2,0 % 5 min.	EN 14476, charge faible et élevée
Polyomavirus (SV40)	2,0 % 5 min.	EN 14476, charge faible

Product characteristics

- Bactéricide (y compris MRSA) et levurocide
- Effet virucide limité (y compris HIV, HBV, HCV, coronavirus)
- Excellentes propriétés de nettoyage
- Conformité HACCP

Remarque

Appliquer exclusivement sur des matériaux résistants aux acides. Toujours vérifier la compatibilité à un endroit peu visible avant l'application. Date de péremption à compter de la production : 3 ans. Conservation après ouverture : 3 ans Respecter la fiche des données de sécurité.

Informations techniques

Doos met 12 flacons à 1 l
Jerrycan à 10 l

art.nr. 00136
art.nr. 30091

Substances actives

100 g contiennent 5,6 g d'acide lactique ; 3,0 g d'éthanol

Identification selon le règlement CE 1272/2008 (CLP) :
Danger ; GHS05

N° d'immatriculation de l'office fédéral de la sécurité et de la santé au travail N-84501

CHZN6347

Utiliser avec précaution les produits biocides.
Toujours lire les étiquettes et les informations-produits avant usage.

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de sécurité. (F) 0421

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE