

# DESIFOR- QUICK

## Unités de vente

## Art-No.

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Bouteille distributeur EURO à 500 ml (boîte 10x500 ml)            | DRS00177 |
| Bouteille avec tête de pulvérisation à 500 ml (boîte 6x500 ml)    | DRS01277 |
| Bouteille avec tête de pulvérisation à 1 litre (boîte 12x1 litre) | DRS00994 |
| Bouteille à 1 litre (boîte 2x1 litre)                             | 20522    |
| Bidon à 5 litre                                                   | 20451    |
| Conteneur à 1 000 litre                                           | 20512    |



## Propriétés du produit

- Bactéricide (y compris le SARM) et levuricide
- Virucide à spectre limité (y compris le VIH, le VHB, le VHC, les coronavirus)
- Sans aldéhydes
- Sans parfums ni colorants
- Application avec une lingette prête à l'emploi : DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, essai à 4 zones)
- Efficacité testée à 4 °C - concentré 1 minute
- Enregistré dans la liste de l'IHO (Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces)
- Conforme à la norme HACCP



## Domaine d'application

Pour une désinfection rapide sans résidus des surfaces résistant à l'alcool dans le domaine de la médecine humaine et dans les secteurs de l'alimentation, de l'industrie et des établissements publics. Réservé à un usage professionnel.

## Instructions d'utilisation

Recouvrir complètement la surface propre à désinfecter et laisser sécher. Respecter le temps d'action. Bactéricide et levuricide : EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 16615, charge élevée et faible : conc. 1 minute. Effet virucide limité (y compris HIV, HBV, HCV) : EN 14476, charge faible conc. 15 secondes

## Tableau de dosage

| Domaine d'application     | Efficacité                                      | Concentration | Temps d'exposition | Notes                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| Désinfection des surfaces | Bactéricide, levuricide                         | 100 %         | 1 min              | EN 13697 (charge élevée)<br>EN 16615 (charge élevée) |
| Désinfection des surfaces | Bactéricide, levuricide                         | 100 %         | 5 min              | VAH (charge élevée)                                  |
| Désinfection des surfaces | Tuberculocide (M. terrae)                       | 100 %         | 30 s               | EN 14348 (charge élevée)                             |
| Désinfection des surfaces | Mycobactéricide (M. terrae et M. avium)         | 100 %         | 1 min              | EN 14348 (charge élevée)                             |
| Désinfection des surfaces | Effet virucide limité (y compris VIH, VHB, VHC) | 100 %         | 1 min              | EN 16777 (charge élevée)                             |
| Désinfection des surfaces | Norovirus                                       | 100 %         | 30 s               | EN 14476 (faible charge)                             |
| Désinfection des surfaces | Rotavirus                                       | 100 %         | 30 s               | EN 14476 (sans charge)                               |

## Substances actives

100 g contiennent 63,1 g de propan-2-ol et 2,9 g d'éthanol

BAuA Reg.-Nr. N-58211 N-58212

BAG Reg.-Nr. CHZN5689

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

#### Notes d'utilisation

- Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'alcool telles que le verre acrylique / le plexiglas.
- Date d'expiration : 3 ans à compter de la production.
- Durée de conservation après ouverture : 12 mois.
- Veuillez respecter la fiche d'instructions de sécurité.

#### Instructions de manutention

- Stockage : uniquement dans le contenant d'origine
- Stockage : endroit frais, sec et bien ventilé
- Stockage: 0°C à 30°C
- Liquides et vapeurs hautement inflammables
- Consulter la fiche de données de sécurité



#### Informations techniques

Couleur du produit: Incolore  
Contient du parfum: Non  
Contient un colorant: Non

Densité: 0,87 g/cm<sup>3</sup>  
GIS code: GDO

#### Marquage



##### Danger

Liquide et vapeurs très inflammables Provoque une sévère irritation des yeux Peut provoquer somnolence ou vertiges

Produit réservé aux professionnels (utilisation professionnelle)  
Les informations contenues dans ce dépliant sont valables pour les zones juridiques EU et CH.  
Toutes les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur nos meilleures connaissances et expériences, mais ne peuvent être considérées comme contraignantes. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour les détails du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou inadéquate et de tout dommage qui en résulterait.



Pour plus d'informations sur les produits et les équipements,  
visitez notre page d'accueil.

<https://shop.dr-schnell.com/desifor-quick>

FR 260611

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

