

DESIFOR- QUICK

Verkaufseinheiten

Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Spenderflasche EURO à 500 ml (Karton 10x500 ml)	DRS00177
Flasche mit Sprühkopf à 500 ml (Karton 6x500 ml)	DRS01277
Flasche mit Sprühkopf à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)	DRS00994
Flasche à 1 Liter (Karton 2x1 Liter)	20522
Kanister à 5 Liter	20451
Container à 1.000 Liter	20512



Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder-Test)
- Wirksamkeit bei 4°C getestet - konzentriert 1 Minute
- IHO-gelistet
- HACCP-konform



Anwendungsbereich

Zur rückstandsfreien Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Anwendungsanleitung

Zu desinfizierende, saubere Fläche vollständig benetzen und abtrocknen lassen. Einwirkzeit beachten.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	100 %	1 min	EN 13697 (hohe Belastung) EN 16615 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	100 %	5 min	VAH (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	100 %	30 s	EN 14348 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	100 %	1 min	EN 14348 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	100 %	1 min	EN 16777 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Noroviren	100 %	30 s	EN 14476 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Rotaviren	100 %	30 s	EN 14476 (ohne Belastung)

Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g 2-Propanol; 2,9 g Ethanol

BAuA Reg.-Nr. N-58211 N-58212

BAG Reg.-Nr. CHZN5689

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Anwendungshinweise

- Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie z. B. Acrylglas/Plexiglas.
- Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 0°C bis 30°C
- Flüssigkeiten und Dampf leicht entzündbar
- Sicherheitsdatenblatt beachten



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 0,87 g/cm³
GIS-CODE: GDO

Kennzeichnung



Gefahr

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar Verursacht schwere Augenreizung Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260611



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/desifor-quick>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

