

DESIFOR- forte AF neu

Verkaufseinheiten

Flasche mit Dosiereinheit à 1 Liter (Karton 9x1 Liter)

Kanister à 5 Liter

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

20491

20492

20493



Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro-, und Adenoviren)
- Frei von Aldehyden
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder-Test)
- IHO-gelistet
- HACCP-konform



Anwendungsbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Als Biozidprodukt: Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Als Medizinprodukt: Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten. Für den professionellen Bereich.

Anwendungsanleitung

Fläche mit - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 1%igen Lösung: 990 ml Wasser vorlegen und 10 ml Produkt zugeben.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	0,5 %	15 min	EN 13697 (hohe Belastung) EN 16615 (hohe Belastung) VAH (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	2 %	15 min	EN 14348 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,5 %	15 min	DVV/RKI-Leitlinie (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid PLUS	2 %	30 min	EN 14476 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Polyomaviren (SV 40)	1 %	15 min	EN 14476 (hohe Belastung)

Wirkstoffe

100 g enthalten 10,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid; 6,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan- 1,3-diamin

Zulassungsnr. DE: N-84407 | CH: CHZN5718 | AT: - | LU: 203/19/L

CE 0124

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Anwendungshinweise

- Verfallsdatum ab Produktion 3,5 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 3,5 Jahre.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 0°C bis 40°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,01 g/cm³

Kennzeichnung



Gefahr

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260903



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/desifor-forte-af-neu>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

