

Milibac N

Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

00323

30092



Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- HACCP-konform
- Geprüft und geeignet für Epoxidharzfugen



Anwendungsbereich

Zur Desinfektion säurebeständiger Flächen im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Industrie und öffentliche Einrichtungen (Sanitärbereich, Schwimmbad, Wellness). MILIBAC N entfernt mineralische und organische Verschmutzungen. Für den professionellen Bereich.

Anwendungsanleitung

Fläche mit - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 2%igen Lösung: 980 ml Wasser vorlegen und 20 ml Produkt zugeben.

Bakterizid, levurozid (EN 13697): 2% 15 Min.; Begrenzt viruzid (EN 14476): 2% 5 Min.; SV40 (EN 14476): 2% 5 Min.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	2 %	15 min	EN 13697 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	2 %	5 min	EN 14476 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Polyomaviren (SV 40)	2 %	5 min	EN 14476 (niedrige Belastung)

Wirkstoffe

100 g enthalten 5,6 g Milchsäure; 3,0 g Ethanol

BAuA Reg.-Nr. N-84501

BAG Reg.-Nr. CHZN6347

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungshinweise

- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
- Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 3 Jahre.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet


Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos

Enthält Duftstoffe: Ja

Enthält Farbstoffe: Nein

 Dichte: 1,12 g/cm³

GIS-CODE: GDO

pH conc

2	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung

Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Wirkt ätzend auf die Atemwege

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).

Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260611



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/milibac-n>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

